

ラップポン（トイレ）の設置

断水等により施設内のトイレが使用できない場合は、ラップポンを設置します。（福祉避難所等で使用します）

① ラップポンは必要に応じて避難所（福祉避難所等）へ配給されます。 ※ 各避難所には備蓄していません

ラク・アーム


ラップポン

ラップポン消耗品セット

（専用フレーム）【約10kg】

トレッカー【約15kg】

（フィルムロール・カラメルポリマー（凝固剤）
・ウエットティッシュ）

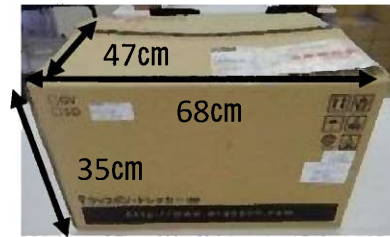

② ラップポントレッカーを組み立てます。
（詳細は付属の説明書を確認してください）

1 底ふたを上にして置き
底ふたを外す



2 左右の脚を引き出す



3 ACアダプターを取り付け、ACアダプターとリモコンを
背面へ引き出す



4 補強棒とネジ2個を
はずす



5 左右の脚に補強棒を
取り付ける



6 本体を起し、底ふた
を本体の真下に置く



完成形
（フィルムロール取付前）



7 フィルムロールを取り付ける（詳細は同封の「フィルムロールの交換」とおり）

※ 最初の1回目は片面が着圧されていませんので使用できません。
フィルムの内側に「STOP」が表示されたらすみやかにフィルムロールを交換してください



※ バッテリーの電源
を入れたとき、残量
が少なければ充電
してください

ラップポン（トイレ）の設置

断水等により施設内のトイレが使用できない場合は、ラップポンを設置します。（福祉避難所等で使用します）

③ ラク・アーム（専用フレーム）を組み立てます。

① 背面フレームとアームフレームを長ネジ4本、ノブナット4個で止める



② アームフレームと補強板を短ネジ4本、ノブナット4個で止める
※ 付属の説明書ではトラッカーの底面に通すと記載されているが、トラッカーの商品が違うため通さない



③ 全てのネジ、ノブナットを付属のワッシャーで締める



④ ラク・アームにトラッカーをのせる
※ トラッカーの脚はしましう



完成形



消耗品セットの内容

- フィルムロール 2ロール
1ロールあたり約50回対応
- カタメルポリマー 2箱
1箱50袋入り
- ウエットティッシュ 2袋
1袋100枚入り



ラップポンの使い方



- ※ 利用者が見える場所に「ラップポンの使い方」を掲示し、カタメルポリマー（凝固剤）とウエットティッシュを備え付けます。
- ※ カタメルポリマーやウエットティッシュには限りがあります。
1回の利用につきカタメルポリマーは1袋、ウエットティッシュは使いすぎないように利用者へ伝えてください。
- ※ 着圧には90秒かかります。必ず着圧が終了してから取り出すよう伝えてください。
- ※ フィルムロールの内側に「STOP」の文字が表示された部分が出てきたら交換の合図です。すみやかに交換してください。